


Souprava pro testování antigenu 2019-nCoV

(Imunochromatografie z koloidního zlata)

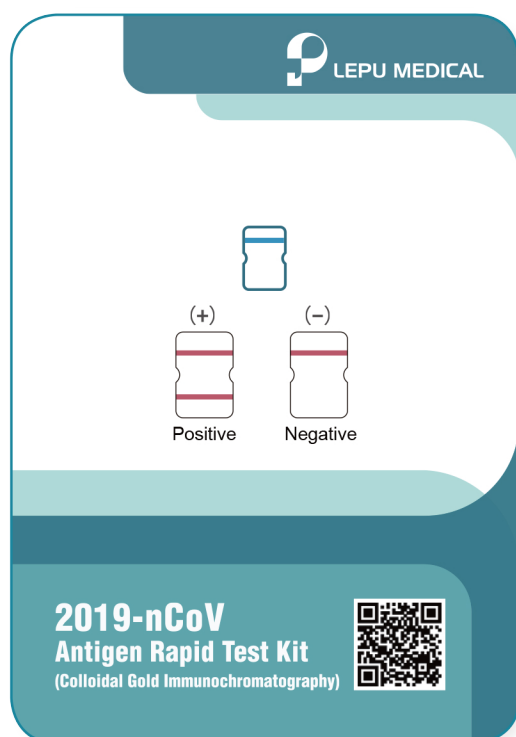

NOVÁ STUDIE

Senzitivita 95,06 % (až 98,54 % při $Ct \leq 25$)
Specifická 99,62%

- 1 Šetrný výtěr z přední části nosu
- 2 Neinvazivní
- 3 Jednoduché použití
- 4 Praktický, **není potřeba přístroj**
- 5 Rychlý, **výsledek za 15 minut**
- 6 Stabilní, s vysokou přesností
- 7 Testy splňují všechny podmínky, které ZP požaduje

Souprava je určena ke kvalitativní detekci antigenu 2019-nCoV v klinickém vzorku. Testovací kazeta je založena na specifické reakci protilátka-antigen a technologii imunoanalýzy.

WHO doporučuje imunotesty k detekci antigenu v diagnostice infekce 2019-nCoV.

Vzorek	Výsledek	Balení
šetrný neinvazivní výtěr z nosu	do 15 min.	25 ks



Nemocnice



Odběrová
místa



Letiště



Doprava



Hotel




Společnosti




Hromadný
screening




Návod k použití

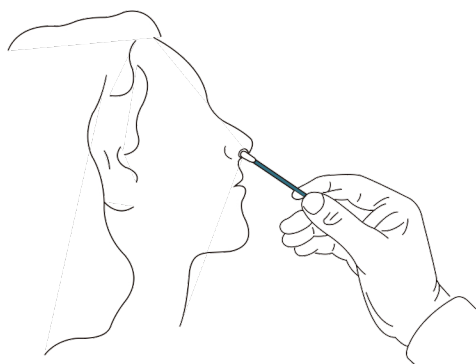


Krok 1: Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky

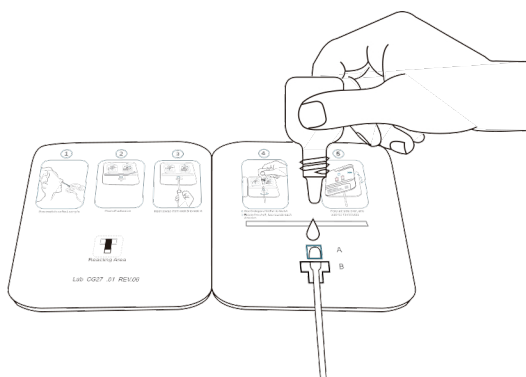

Krok 2: Protáhněte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte 6 kapek pufru do jamky A.

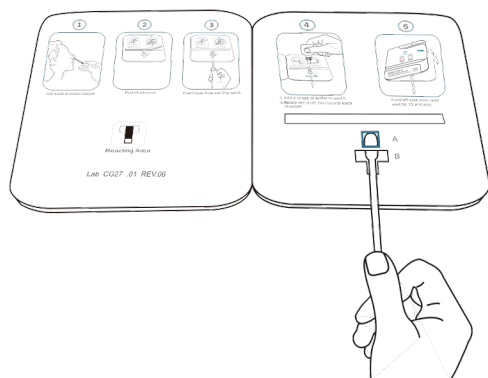

Krok 3: Tyčinku dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.

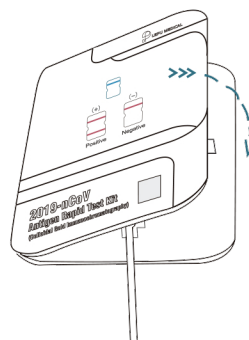

Krok 4: Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Slepě levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.



Interpretace výsledku


**Pozitivní
(+)**



**Negativní
(-)**



Neplatný

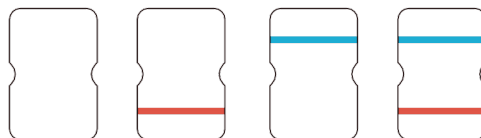

Poznámky